


# MP伸展装具 使用説明書

## ◆左右兼用です◆

- ① マジックテープの輪に親指を通します。
- ② 手首のマジックテープをしっかりとめます。

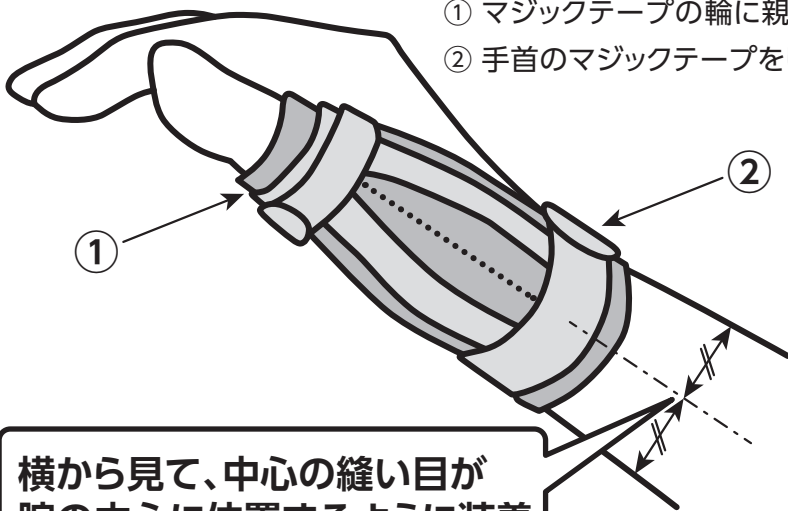

横から見て、中心の縫い目が腕の中心に位置するように装着


### 【ご使用の注意点】

- 装具は医師の処方に基づき製作されています。
- 過度のしめつけは、しびれ等をおこす可能性があるため十分にご注意下さい。
- 傷や痛みがある場合、医師または担当の義肢装具士にご相談下さい。



### 【お手入れ方法】

- 中の芯を抜いてから、中性洗剤をぬるま湯に溶かして押し洗いをし、十分にすすいだ後水分をとって陰干しして下さい。
- 洗濯機、乾燥機、漂白剤、アイロンのご使用はおやめ下さい。

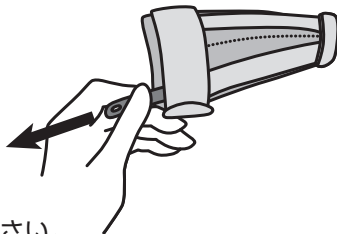

TAMURA

(株)田村義肢製作所

〒950-1151 新潟市中央区湖南21-11 TEL:025-281-0303