

Super Real Color Hand

スーパーリアルカラーハンド
K-H-057RC-SP

商品コード：00210115

殻構造/義肢用部品/手先具/
D装飾手袋 (コスメティックグラブ)

2017年度厚生労働省
完成用部品に新規指定
になりました。



特徴

POINT
1

マイクロサージャリーの高度化に伴う断端形状の多様化の背景を受け、
いままでの既製品では適応できなかった難症例への適応も期待できる。

POINT
2

差込口部分に伸縮性のあるシリコンを使っているため、装着がしやすく
テーパーをつけることで繋ぎ目が自然になっている。

POINT
3

断端に適合したソケットは外表面まで一体化となっていて、
義手の適合と外力に対する支持性の向上が期待できる。

装飾用義手本来の再現性の獲得はご使用者のQOLの向上に大きく貢献し、また適合性の向上はADLのより確実な獲得を促します。

完成するまでの流れ

スーパーリアルカラーハンドをご注文いただく場合、次のような段階手順で進めていきます。

製作に臨む場合、これまでの装飾用手部義手とは異なった「採型」「仮合わせ」「適合」の技術が義肢装具士に求められます。

STEP1 事前確認

注文前に断端の
写真や動画を
確認して最適な
採型方法を
選択します。

STEP2 注文



採型

STEP3 仮合わせ



チェッククリアハンド

STEP4 納品



完成

採型方法

採型は患者さまの断端形状によって、使用される印象材料と採型方法が変わります。



断端形状

患者さま一人ひとりの断端形状に合わせて製作します。


青色：切断・欠損 水色：ソケット

第1～5指


第2～5指

第1～2指


第4～5指

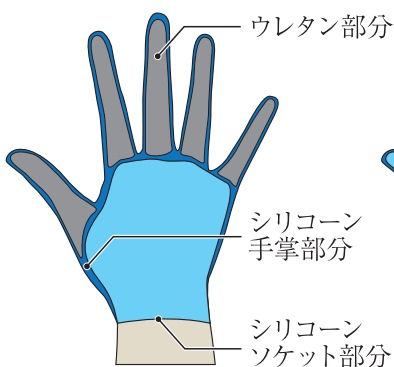

商品の構造図

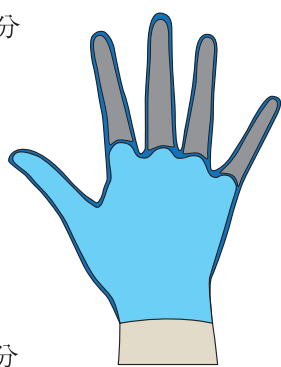

関節と母指の可動域を妨げないように配慮。

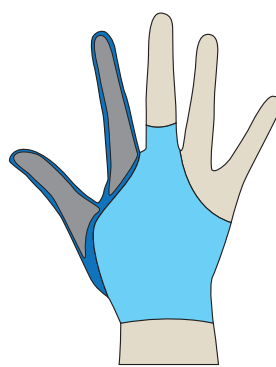

関節と隣接するMP関節の可動域を妨げないように配慮。

お問い合わせは、お近くの義肢装具製作所にご相談下さい。

販売元

株式会社 啓愛義肢材料販売所

URL : <http://www.po.kioa.co.jp>

E-mail : info@kioa.co.jp

取扱店