

側弯症装具 使用説明書


【コルセットのつけ方】

①



コルセットの前後を確認して下さい。長めの肌着やTシャツの上から装着し、肌に直接あたらないようにして下さい。

②

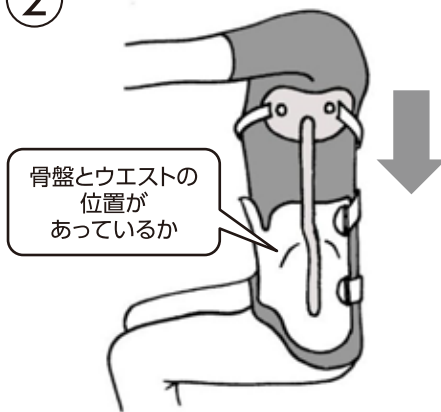


座った状態で、コルセットを足の付け根ぎりぎりまで下げ、ベルトを下から順に締めます。

③




立ってからもう一度ベルトを下から順にしっかり締め直します。

④

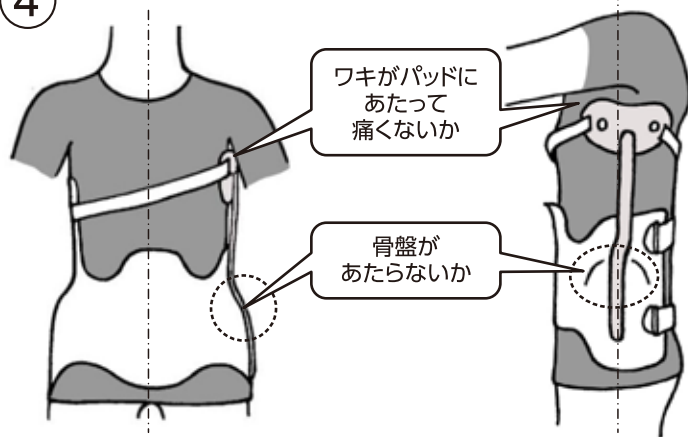

痛いところがある場合、すぐに調整しますので担当義肢装具士にお伝え下さい。

⑤ 寝るときの締め方

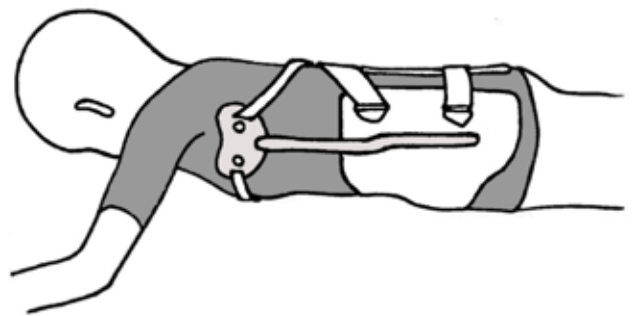

うつぶせに寝て、ベルトをきつく締め直します。

ベルトをしっかり締めないと矯正効果が期待できません

- 立った時、寝ている時でベルトのきつさが変わるため、その都度調整して下さい。
- コルセットの上から下着とズボンをかぶせて履いていただくと、トイレの時に楽です。
- 洋服のシワが痛みの原因になるので、背中の中の中心に引っ張ってシワを伸ばして下さい。
- 装具完成後、定期的な診察と装具のチェックが必要になります。

【ご使用の注意点】

- ・コルセットは医師の処方に基づき製作されています。
- ・成長して装具が合わなくなった場合や装具を外してから30分経っても皮膚の赤みがひかない場合、医師または右記の連絡先へご相談下さい。



TAMURA

(株)田村義肢製作所

〒950-1151

新潟市中央区湖南21-11

TEL: 025-281-0303