

短下肢装具用 後方バンパー

スナップ ストップ (17S1)

完成用部品
認可製品

Quality for life



SNAPSTOP™
INTERCHANGEABLE PLANTAR FLEXION STOP SYSTEM

モールド成形した後も角度変更ができる

継手付プラスチック製短下肢装具用 後方バンパースナップ ストップ

こんな時にお使いいただけます

- リハビリの進行度によって角度を変えたい
- 採型から適合までに身体状況が変わってしまったとき 等


特徴

● へたりにくい高密度ポリウレタン製

装具に使用するバンパーは耐久性に優れ、角度変化しないものが望めます。
オットーボックのスナップストップは高密度ポリウレタン製で耐久性が高く、踵接地時の衝撃をしっかりと吸収できます。

● 角度調整機能

下腿部に埋め込まれたダミーの代わりに任意の厚さのスナップストップを挿入することで角度を変更することができます。
スナップストップの交換で角度を変更するので、装具本体を削ることなく初期設定角度を変えることができます。

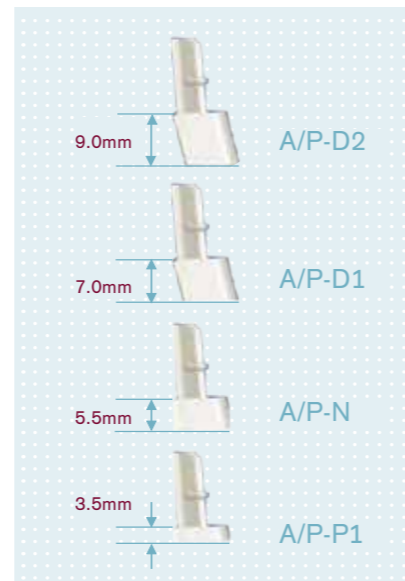


● バンパー取り付けの製作時の手間を軽減


スナップストップを取り付けるのはとても簡単です。ダミーをモデルに設置した後はシューホーンタイプ同様にプラスチック成型するだけです。
トリミング後、下腿部のダミーをスナップストップに交換します。

製作手順

1 ダミーを陽性モデルに設置する。

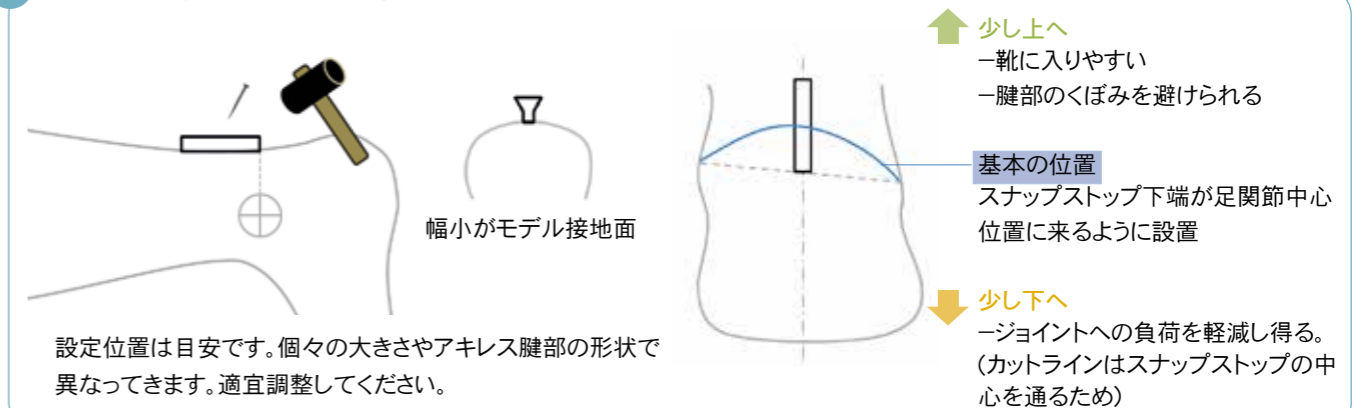


2 プラスチック成型し、切り出す。

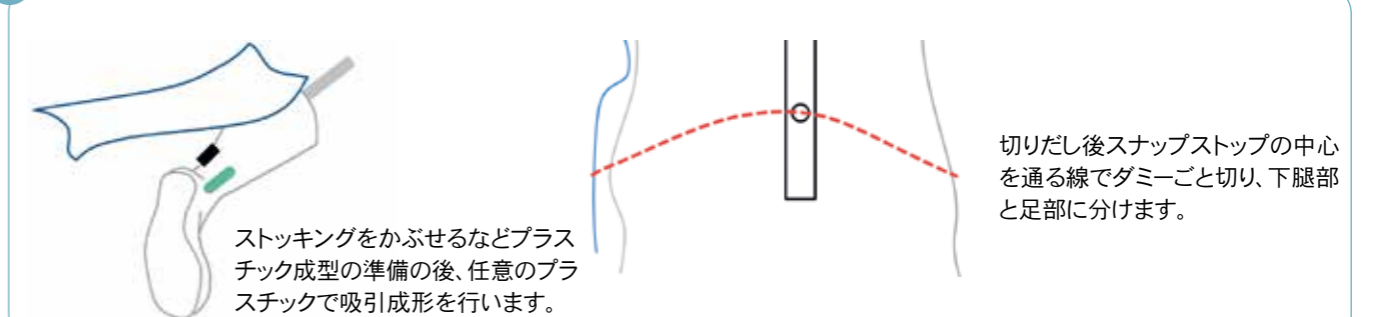

3 トリミングし、スナップストップをセットする。

装具内側からトリミングラインを確認します。
ダミーの印を通るトリミングラインまで下腿部、足部を削り下げてください。(右図参照)
この間が約5.5mmとなりA-N/P-Nと同じ幅になります。
モールド時の角度をこれで再現できます。

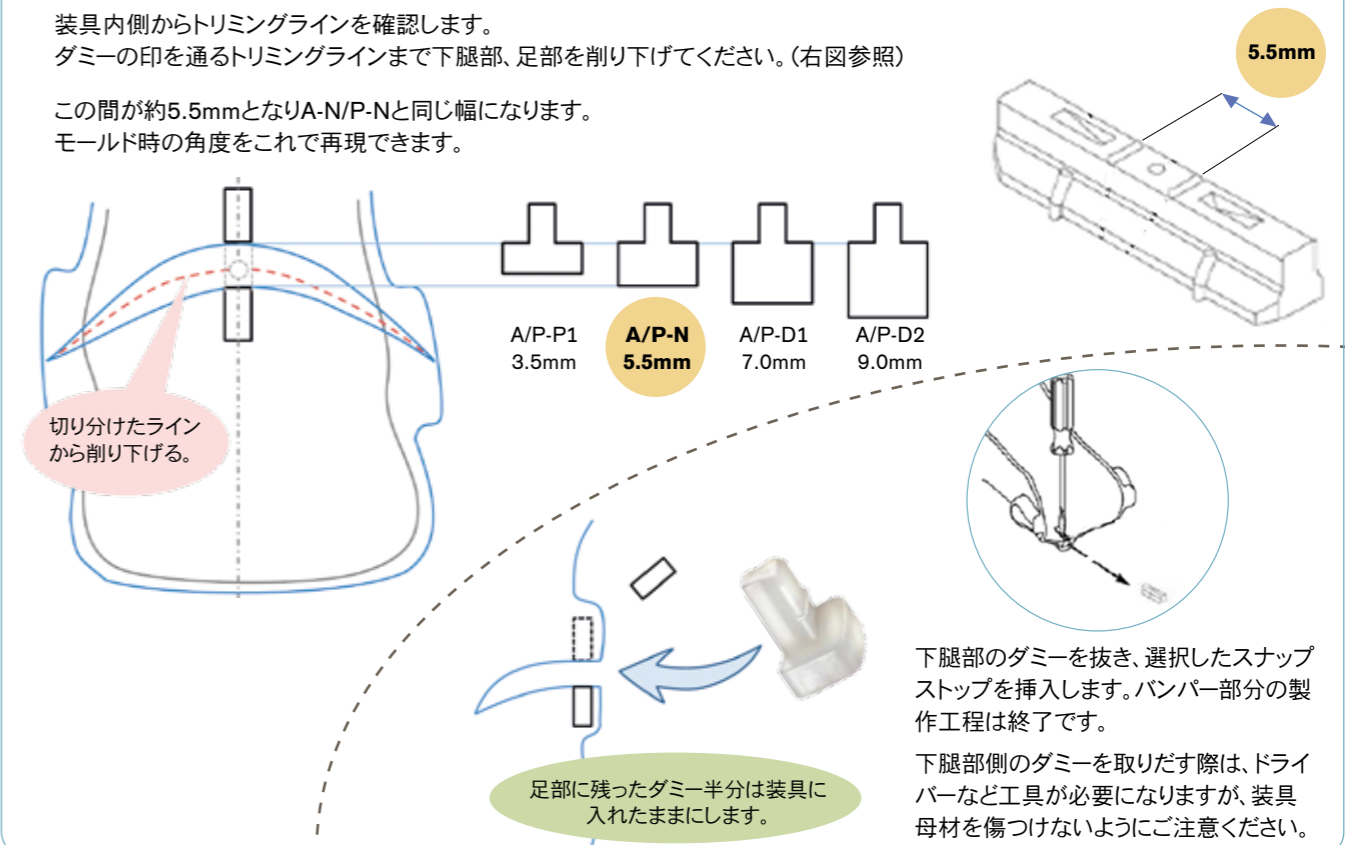

後方バンパー スナップ ストップ



QRコード

ホームページでもご覧いただけます。 www.o.ottobock.jp/custum/product/17s1.html

製品サイズ

発注品番	製品名	セット内容
17S1= A-KIT	スナップストップ 大人用 セット	本体 3.5/5.5/7.0/9.0mm x 各4個、ダミー16個、固定用のクギ16本
17S1= P-KIT	スナップストップ 小児用 セット	本体 3.5/5.5/7.0/9.0mm x 各4個、ダミー16個、固定用のクギ16本、背屈角度増強チップ1個
発注品番	製品名	セット内容
17S1= A-P1	スナップストップ 大人用 3.5mm	本体1個、ダミー1個、固定用のクギ1本
17S1= A-N	スナップストップ 大人用 5.5mm	
17S1= A-D1	スナップストップ 大人用 7.0mm	
17S1= A-D2	スナップストップ 大人用 9.0mm	
17S1= P-P1	スナップストップ 小児用 3.5mm	本体1個、ダミー1個、固定用のクギ1本
17S1= P-N	スナップストップ 小児用 5.5mm	
17S1= P-D1	スナップストップ 小児用 7.0mm	
17S1= P-D2	スナップストップ 小児用 9.0mm	
17S2= A-MB	スナップストップ ダミー 大人用	ダミー1個、固定用のクギ1本
17S2= P-MB	スナップストップ ダミー 小児用	ダミー1個、固定用のクギ1本
17S2= P-R*	小児用背屈増強チップ	本体1個

- 大人用と小児用ともに、各本体の厚みは同じになりますが、小児用の差込み径とチップの底面の大きさは小さくなります。
- 16個セット(大人用/小児用)もしくは各サイズ1個単位にて、ご注文いただけます。 - *:小児用背屈増強チップは海外からの取寄せとなります。

お問い合わせ先

- ・本カタログは医師または義肢装具士などの医療従事者向けです。
- ・予告なく製品の仕様やデザインが変更になることがあります。
- ・カタログの写真と実際の製品とでは、色などに違いがある場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・本カタログの内容は 2016 年 4 月現在のものです。