

TAMURA SHOES KIDS & JUNIOR

田村義肢製作所 小児靴型装具

ご利用者の一足に、
こころと技術を尽くします



TAMURA SHOES KIDS & JUNIOR

TAMURA SHOESとは

医師の指示のもとに、義肢装具士（国家資格）が
ご利用様の足の寸法や型をとり、
一足一足オーダーメイドで製作します。
解剖学や整形外科学などの専門知識を用いて、
ご利用様や関係者様の
目的に寄り添った靴をお渡しできるよう、
新しい製品のアイデアと快適さを
追求し続けていきます。



特徴

Characteristic

足首までしっかり包む
ミドルカットモデル

足首にやさしい
クッション

ベルトの先に
オリジナルワンポイントを
入れられます

ゆとりある足芯の形状
つま先補強材入り

しっかりとした
踵カウンター

治療目的に沿った
ソールの形状



インソール

足裏から
治療を促す
インソール入り



広々とした 履き口

足先まで大きく
開きます

※インソール単品での販売も行っています。
色もお選びいただけます。

製作の流れ Product

一つ一つオーダーメイドで製作しています。



1 採寸・採型

処方内容に基づき、ご利用者様とデザイン等の相談を行い、足の寸法や型をとります。



2 靴型選択・石膏モデル修正

ご利用者様の足を確認し、変形や矯正の具合、デザインに応じて靴型(木型)を選択、もしくは石膏モデルを修正します。



3 チェックシューズ製作

靴型をもとに、インソールとチェックシューズを製作します。仮合わせ用のベルトやソールも付いています。



4 仮合わせ

透明な材質のため、靴を履いた状態で靴内部の足の具合を目視できます。また、歩いている時の足の状態や歩き方なども確認します。



5 微調節・型紙

仮合わせ結果から再度モデル修正を行い、足先形状や周径の調節を行います。靴型にデザインを記入し、型紙を製作します。



6 裁断・縫製

型紙をもとに革を裁断し、アップパー(甲革)を製作します。



7 吊り込み・仕上げ

アップパーを靴型に沿わせ「靴」の形にします。靴型の形に馴染んだら、ソールを付けて仕上げます。



8 納品・適合

最終的な適合の状態を確認して、ご利用者様へお渡しします。

Basic

TYPE

ベーシックタイプ



さまざまなカスタマイズに
対応できます。
豊富なカラーも魅力。



また
来ようね！

私たちはいつも、
笑顔のご利用者様を
思いうかべています。

Basic

ベーシックタイプ

※足長が小さい場合は、ベルトが2本になります。



101
茶/ベージュ



102
白/紺



103
紺/青



104
茶/ピンク



105
黒/赤



106
ベージュ/茶



107
白/ピンク



108
白/水



109
白マルチ/水



110
白マルチ/黄



111
白マルチ/ピンク



112
黒マルチ/水



113
黒マルチ/黄



114
黒マルチ/ピンク

●糸の色について
101-106
革と反対の色になります。
107-111
すべて白になります。
112-114
ベルト・ラウンド部分は黒、
他は白になります。

インソール
(靴の中敷き)の
色が選べます。



青



赤



茶



紺



マルチ

Sneaker TYPE
スニーカータイプ

Sailor TYPE
セーラータイプ

Street TYPE
ストリートタイプ

足首やつま先、踵のデザインに
おしやれなバリエーション。
お気に入りの一足が
見つかります。



目的をかなえる為の
最高の一足をつくります。

Sneaker

スニーカータイプ

※足長が小さい場合は、
ベルトが2本になります。
※外科開きタイプは対応しません。



201
ピンク



202
青



203
ベージュ

Sailor

セーラータイプ

※足長が小さい場合は、ベルトが2本になります。
※外科開きタイプは対応しません。
※支柱付短下肢装具には適しません。



301
紺



302
水



303
黒

Street

ストリートタイプ

※足長が小さい場合は、ベルトが2本になります。
※外科開きタイプには適しません。



401
黒/白



402
黒/赤



403
黒/黄



404
黒/青

成長に合わせて作り替えましょう

子どもたちの足は
どんどんサイズが
変化します。

年齢	0歳	1~2歳	3~5歳	6~14歳	15~17歳	18歳~
作り替えの目安	4ヶ月	6ヶ月	10ヶ月	1年	1年6ヶ月	1年6ヶ月

Original SHOES

オリジナルシューズ

世界にひとつだけ!
自分だけの
オリジナルシューズも作れます。

● 甲革の色 10色



● 抜き型 4種類



● 抜き型の色 14色



Color

パーツの色が
選べます



● 糸の色 10色



● ベルト先の形状 丸/角

● 靴底の色 4色



※滑り止めは、標準
(クレープゴム) 以外の場合
無い色もあります。

Shape

パーツの形状が
選べます

● 踵の形状



● 開き方



ノーマルタイプ

外科開きタイプ

ノーマルタイプよりさらに
脱ぎやすく履きやすい
足先まで開くタイプです

CHECK POINT

オリジナルシューズ
チェックポイント!

- デザインは? 例) ベーシックタイプ
- 甲革の色は? 例) 黒/ピンク
- ベルト・先の形は? 例) 丸
- ベルト・抜き型は? 例) ★のシルバー
- 糸の色は? 例) 甲革は白/他は黒
- 靴底の色は? 例) 白

製作例

Evonole

用途に合わせて
さまざまなカスタマイズが
可能です。



疾患名 脚長差
仕様 左足3cm補高



疾患名 先天性内反足
仕様 足背ベルト



疾患名 二分脊椎
仕様 プラスチック製 踵カウンター
オーダーインソール

疾患名 脳性麻痺
仕様 足背ベルト
つま先の補強



疾患名 脳性麻痺
仕様 支柱付靴型装具
足背ベルト
Tストラップ付
オーダーインソール



ご使用にあたって Manual

靴のかかとを踏まない
靴のかかとは硬い芯材が入っています。靴のかかとを踏むと、この芯材が破損し思わぬケガをしたり、装具としての機能が損なわれたいします。

ベルトはしっかりと締め、上から押さえる
ベルトは締めた後に上から押さえると、接着強度が増します。

滑りやすい路面では十分注意して歩行する
雨や雪、凍結などによって濡れた路面やタイル、マンホールの上などの滑りやすい路面では、滑って転倒する危険があります。

皮膚に異常を感じたら使用を控える
かゆみ・かぶれなど皮膚に異常を感じた場合には、直ちに使用をおやめ下さい。

雨天・冬期のご使用上の注意
融雪剤（塩化カルシウム）や雨などの濡れによって
皮革の収縮や硬化が発生することがあります。

〔保管について〕

- 乾燥させる際は必ず陰干して下さい。火のそばに置いたり、直射日光やドライヤーなどの熱風で乾燥させたりすると、変形・変色・劣化する恐れがあります。
 - 高温・多湿の場所には長時間放置せず、通気性の良い所で保管して下さい。
 - 油が付着すると、変形・変色・劣化する恐れがあります。
- ※長期間使用しなかった場合、靴底や靴本体が劣化する場合があります。

〔靴のお手入れ〕


- 本製品は革を使用しています。革靴用のクリーナーやクリーム等でお手入れして下さい。
- カラフルな革の場合は色落ち・色移りする場合があります。

正しい靴のはき方 How to put on shoes

トラブルを防止し、足を正しくサポートするはき方です。


1

すべてのベルトをはずし、つま先まで広げます。

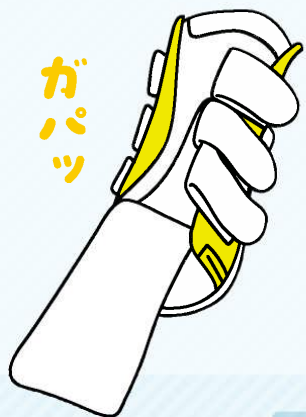

2

足を入れ、踵をトントンと軽く叩き、しっかりと足を入れます。

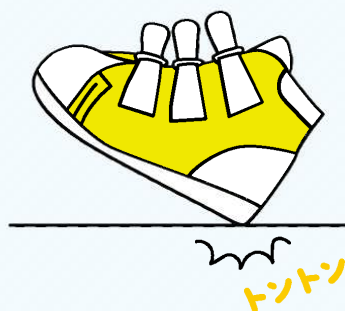

3

すべてのベルトを締めます。
(足首ベルトは特にしっかりね!)



4

痛いところはないかな？
上手に履けました (^-^)/



取扱製品 Products

他にもこんな製品を
取り扱っています。

義足

病気や事故などで足を失った方の代わりになるものです。様々なパーツをご用意しています。



下肢装具

足が不自由な方の機能を補うものです。



コルセット

腰に痛みや変形がある方の負担を減らす為のものです。



義手

病気や事故などで手を失った方の代わりになるものです。



インソール

足の痛みを抱える人の為に靴の中に入れて痛みを和らげるものです。



アクセス Access

バスをご利用の方


- 新潟大学病院より
 - S1 市民病院線 市民病院行き (約30分)
鳥屋野湯公園前 下車、徒歩4分
- JR東日本新潟駅南口バスターミナルより
 - S7 スポーツ公園線 市民病院行き (約20分)
市民病院西 下車、徒歩3分

タクシーをご利用の方


- JR東日本新潟駅南口より……………15～20分
- 新潟空港より……………30～40分

お車で お越しの方

- 新潟中央IC降りて3分 (新潟市民病院様の向かい)

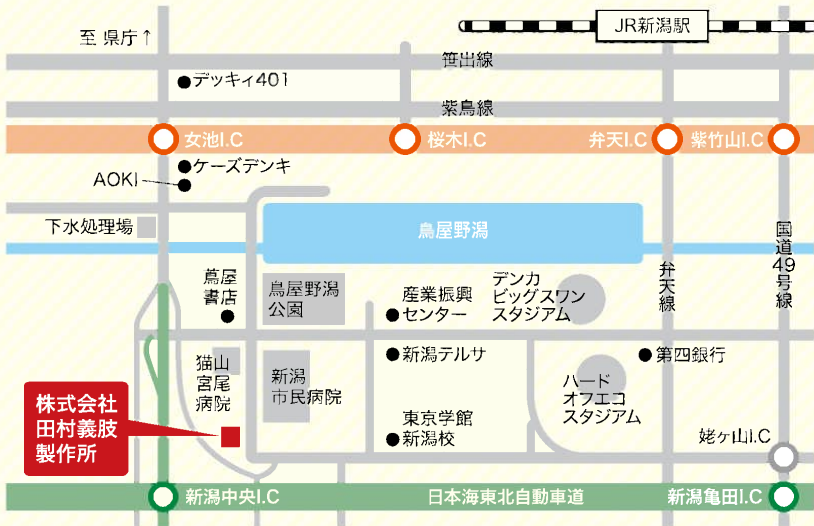

株式会社
田村義肢
製作所

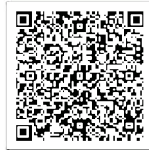

Facebookで
いいね!してね



新潟田村義肢

検索



一般社団法人日本義肢協会 中部125号
株式会社 **田村義肢製作所**
〒950-1151 新潟市中央区湖南21番地11
TEL.025-281-0303

【営業時間】 ●平日/8:30~17:00
●土曜/9:00~12:00

【休日】日曜・祝日

<https://www.po-tamura.com>