

コルセット取扱い説明書

本製品をご利用の前に、この取扱い説明書をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。
取扱い説明書はいつでも読めるように、大切に保管して下さい。


コルセット装着について

- コルセットを装着するときは、綿の肌着の上に装着してください。
- コルセットには左右、前後がありますので確認してください。（下図参照）
前・・・マジックベルト
後・・・編み上げ紐（紐のないものもあります）
上下・・・“上”の印が上にきます
- コルセットの装着位置は、椅子に軽く腰掛けたときに太ももにかかる程度で、前の開きと後ろの編み上げ紐が体の中心で左右均等になるように装着してください。
※ 後ろの編み上げ紐は、体がやせたり、太ったりしたときのみ調整してください。
- ベルトは前ベルトと、装具後方からくる補助ベルトがあり、前ベルトを下から順番に締めていき、最後に補助ベルトを締めて下さい。



注意事項

- コルセットを洗濯するときは、ぬるま湯にて手洗いをしてください。
（汚れが目立つ場合は、中性洗剤をご使用ください。）
乾燥は必ず陰干しをしてください。
※ 洗濯機やドライクリーニングはお止めください。
※ ドライヤーや乾燥機のご使用は、形が変わる場合もございますのでお止めください。
- カイロとコルセットの併用はお止めください。
- 装着時間、装着期間は担当の医師にご確認の上、必ずその指示に従ってください。

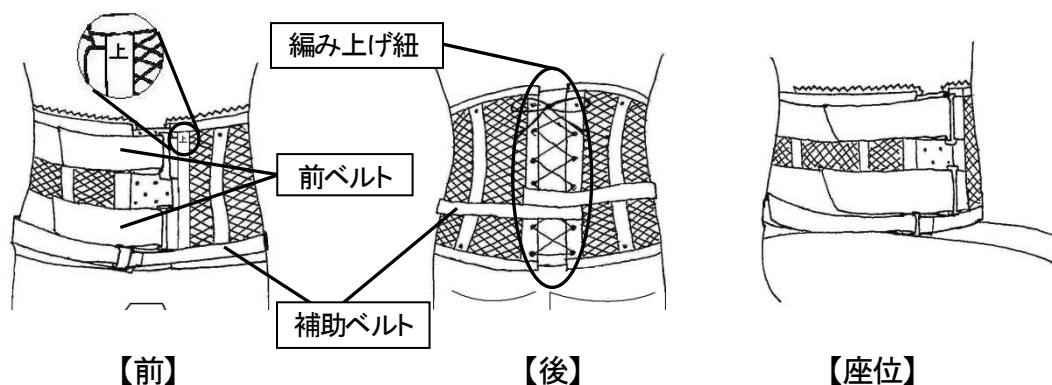

その他コルセットの耐用年数や取扱いに際して、不明な点やお気付きの点がございましたら弊社までお問い合わせください。



株式会社 田村義肢製作所

〒950-1151 新潟県新潟市中央区湖南 21-11
TEL (025) 281-0303 FAX (025) 281-0339