
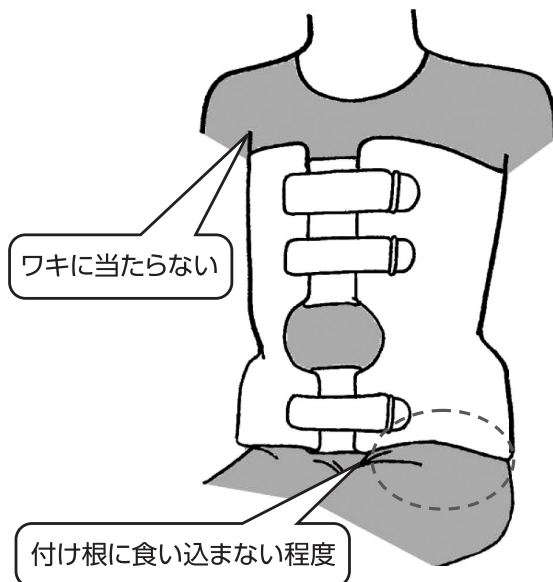


ハードコルセット(前開き型) 使用説明書

【コルセットのつけ方】

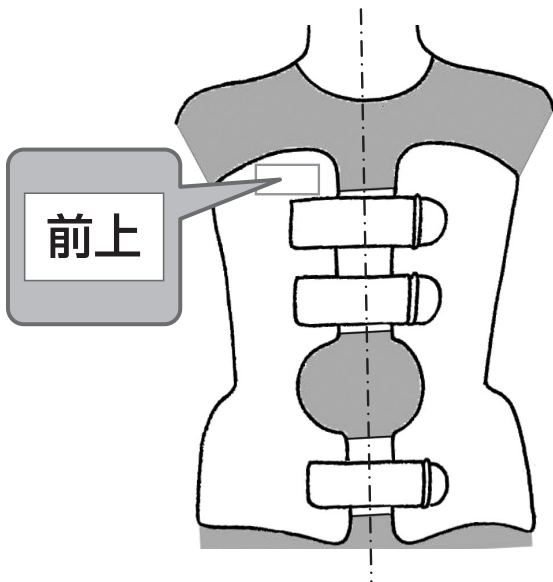

- ①コルセットは肌着やTシャツの上から装着します。
直接つけると、摩擦により傷ができてしまうことがあるので、肌
に直接あたらないようにして下さい。
 - ②コルセットには前と後ろがあります。全面上部に「前上」と書かれたシールが貼ってあるので前後を確認して下さい。
 - ③おへその中心がコルセット前面の中心になります。
 - ④マジックベルトを外し、身体に装着します。
 - ⑤一度つけたら、コルセットを下に押し、骨盤の位置でしっかり身体に合わせます。
 - ⑥コルセットがずれないために、マジックベルトはしっかり締め
めて下さい。特に一番下のベルトはきっちり締めて下さい。
 - ⑦いすに座ったときに、コルセットの下縁が、太ももの付け根
に食い込まない程度の位置に装着して下さい。
 - ⑧上縁はワキに当たらないか確認して下さい。
- コルセットの上から下着とズボンをかぶせて履いて
いただくと、トイレの際に楽です。

【ご使用の注意点】

- ・コルセットは医師の処方に基づき製作されています。
- ・ご使用に関しては、医師もしくは義肢装具士の指示に従い、装着して下さい。
- ・傷や痛みがある場合、医師または担当の義肢装具士にご相談下さい。



(株)田村義肢製作所

TAMURA

〒950-1151

新潟市中央区湖南21-11

TEL: 025-281-0303