



ハードコルセット(前開き) 使用説明書

【コルセットのつけ方】

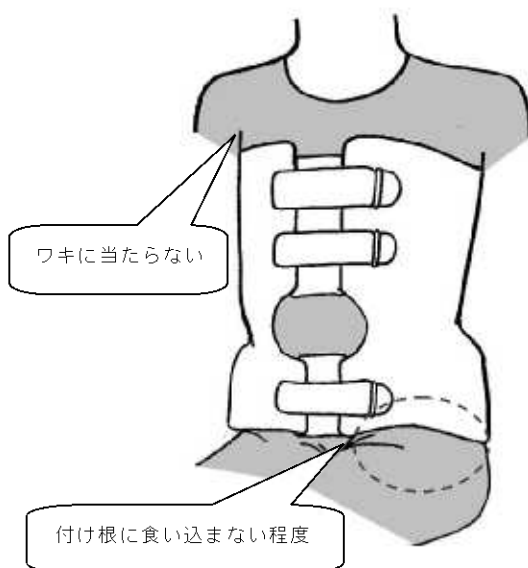

- ① コルセットは肌着やTシャツの上から装着します。直接つけると、摩擦により傷ができてしまうことがあるので、肌には直接あたらないようにして下さい。
 - ② コルセットには前と後ろがあります。全面上部に「前上」と書かれたシールが貼ってあるので前後を確認して下さい。
 - ③ おへその中心がコルセットの中心になります。
 - ④ マジックベルトを外し、身体に装着します。
 - ⑤ 一度つけたら、コルセットを下に押し、骨盤の位置でしっかり身体に合わせます。
 - ⑥ コルセットがずれないために、マジックベルトはしっかり締めて下さい。特に一番下のベルトはきっちり締めて下さい。
 - ⑦ いすに座ったときに、コルセットの下縁が、太もものつけねに食い込まない程度の位置に装着して下さい。
 - ⑧ 上縁はワキに当たらないか確認して下さい。
- コルセットの上から下着とズボンをかぶせて履いていただくと、トイレの際に楽です。

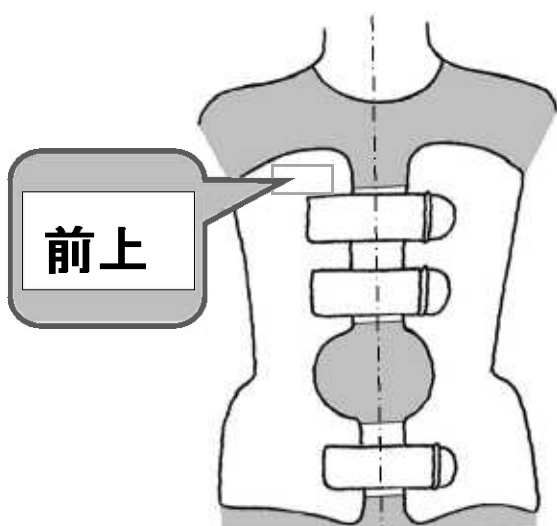

(株) 田村義肢製作所

〒950-1151

新潟市中央区湖南 21-11

TEL : 025-281-0303

【ご使用の注意点】

- ・コルセットは医師の処方に基づき製作されています。
- ・ご使用に関しては、医師もしくは義肢装具士の指示に従い、装着して下さい。
- ・コルセットの長さは個人の必要に応じて決められています。
- ・傷や痛みがある場合、医師または担当の義肢装具士にご相談下さい。